



Accent MRI™
PM1124 PM2124
PM1224 PM2224

Assurity MRI™
PM1272
PM2272

Endurity MRI™
PM1172
PM2172

Endurity™
PM1162
PM2162
Endurity™ Core
PM1140 PM2140
PM1152 PM2152

Tendril MRI™ všechny délky
LPA1200M/46
LPA1200M/52
LPA1200M/58

PARAMETRY A



Zobrazovací systém 1,5 T
SAR pro celé tělo ≤ 4 W/kg
SAR pro hlavu ≤ 3,2 W/kg
Rychlost změny gradientu ≤ 200 T/m/s
Maximální délka vyšetření **bez limitu**

BEZ ZÓNY RESTRIKCE

Tendril STS™ délky 46, 52 a 58 cm
2088TC/46
2088TC/52
2088TC/58

PARAMETRY B



Zobrazovací systém 1,5 T
SAR pro celé tělo ≤ 2 W/kg
SAR pro hlavu ≤ 3,2 W/kg
Rychlost změny gradientu ≤ 200 T/m/s
Maximální délka vyšetření **30 min.**

ZÓNA RESTRIKCE

- Izocentrum vyšetření musí být **10cm nad obratlem C1**
- Izocentrum vyšetření musí být **na úrovni obratle L4 nebo níže**

IsoFlex™ délky 46 a 52 resp. 52 a 58 cm
1944/46 1944/52
1948/52 1948/58

PARAMETRY C



Zobrazovací systém 1,5 T
SAR pro celé tělo ≤ 2 W/kg
SAR pro hlavu ≤ 3,2 W/kg
Rychlost změny gradientu ≤ 200 T/m/s
Maximální délka vyšetření **30 min.**

ZÓNA RESTRIKCE

- Izocentrum vyšetření musí být **na úrovni obratle C1 nebo výše**
- Izocentrum vyšetření musí být **na úrovni obratle L4 nebo níže**

Parametry vyšetření v prostředí MR

Pokud je implantovaný systém tvořen kombinací elektrod s různými parametry vyšetření MR, je pro výsledný systém nezbytné zvolit parametry nejvíce omezující.



Elektroda Tendril MRI™


PARAMETRY A

**BEZ ZÓNY
RESTRIKCE**

MODEL ELEKTROD
LPA1200M/46/52/58

MODEL PŘÍSTROJŮ

Accent MRI™
PM1124 PM1224
PM2124 PM2224
Assurity MRI™
PM1272 PM2272
Endurity MRI™
PM1172 PM2172

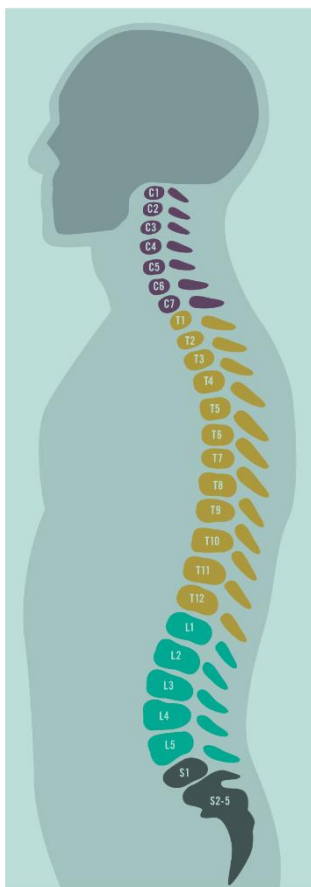

Elektroda Tendril™ STS

PARAMETRY B

**PŘIBLIŽNÁ
ZÓNA RESTRIKCE**

MODEL ELEKTROD
2088TC/46/52/58

MODEL PŘÍSTROJŮ

Accent MRI™
PM1124 PM1224
PM2124 PM2224
Assurity MRI™
PM1272 PM2272
Endurity MRI™
PM1172 PM2172
Endurity™
PM1162 PM2162
Endurity™ Core
PM1140 PM2140
PM1152 PM2152



Elektroda IsoFlex™ Optim™

PARAMETRY C

**PŘIBLIŽNÁ
ZÓNA RESTRIKCE**

MODEL ELEKTROD
1944/46/52
1948/52/58

MODEL PŘÍSTROJŮ

Accent MRI™
PM1124 PM1224
PM2124 PM2224
Assurity MRI™
PM1272 PM2272
Endurity MRI™
PM1172 PM2172
Endurity™
PM1162 PM2162
Endurity™ Core
PM1140 PM2140
PM1152 PM2152



Zóny restrikce se mohou lišit v závislosti na výšce pacienta, zobrazovaném poli MR vyšetření a dalších faktorech.